

SNAP® testų rinkinio naudojimas

Gyvūno sveikatos tikrinimas be spėliojimų

Kraujo/serumo/plazmos mėginio testo atlikimas



1. Įlašinti 3 lašus mėginio ir 4 lašus konjugato į vienkartinį mėgintuvėlį



2. Švelniai apversti mėgintuvėlį su mėginių 4-5 kartus



3. Visą mėginio turinį supilti į SNAP® įtaiso mėginio "šulinį"



4. Kai tik pasirodys spalva aktyvacijos žiede, nuspaukit įrenginį, jog aktyvuoti. Išgirsit išskirtinį spragtelėjimą



5. Pasibaigus atitinkamam laiko tarpui, įvertinkit rezultatus

Fekalijų mėginio testo atlikimas



1. Tepinėlio mėginį patalpinti į vienkartinį mėgintuvėlį. Palenkinti bumbulą, jog pažeisti plomą ir išlaisvinti konjugatą



2. Spausti ir atpalaiduoti bumbulą 3-4 kartus, jog sumaišyti mėginį su konjugatu



3. Paspausti bunnulą, jog įlašinti 5 lašus mėginio į SNAP® įrenginio mėginio "šulinį"

Mėlynas taškas = teigiama


Betkoks spalvos išryškėjimas mėginio vietoje rodo teigiamą rezultatą. SNAP® cPL™ testas ir SNAP® fPL™ testas yra išimtis, nes jie pateikia lyginamuosius pavyzdžius.

Rezultatų vertinimas


Svarbu

🕒 Raidos laikas minutėmis. 🌡️ Laikyti kambario temperatūroje arba šaldytuve. ❄️ Laikyti šaldytuve. **Visi komponentai turi būti kambario temperatūros prieš pradėdami testą.**


PERNEŠĖJŲ PLATINAMA

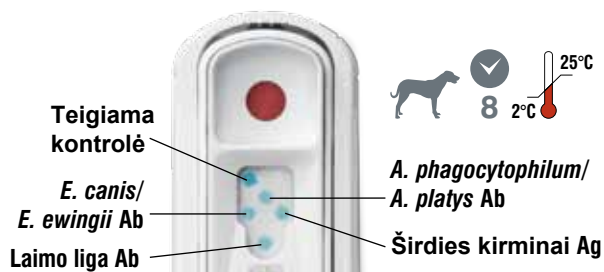

4Dx® Plus—Kasmetiniui šunų tikrinimui dėl šešių pernešėjų platinamų ligų

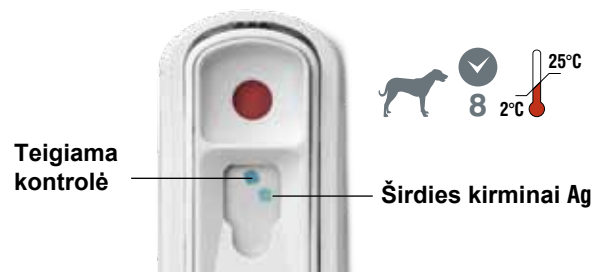


Heartworm RT—Kasmetiniui šunų tikrinimui dėl širdies kirminų

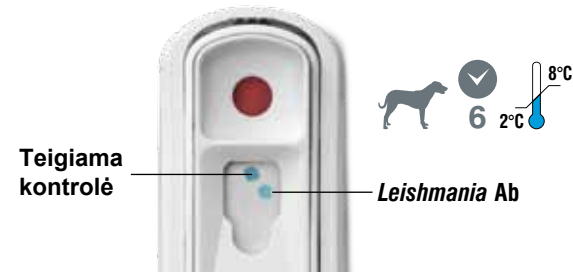


Leishmania — Pavasariniui šunų tyrimui dėl Leišmaniozės

RETROVIRUSAS

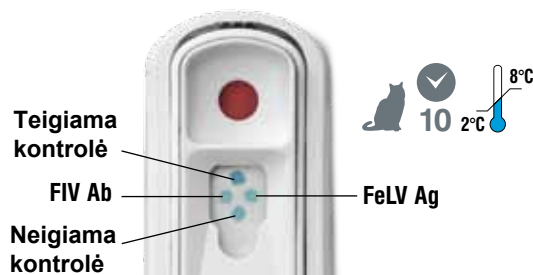

FIV/FeLV Combo—Testas katėms priklausančioms rizikos grupei ar su ligos simptomais


PANKREATITAS

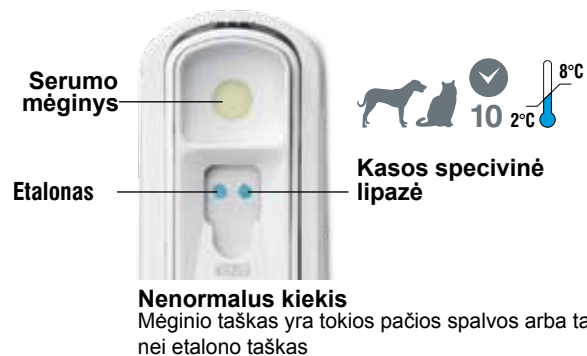


cPL (šunų kasos specifinė lipazė)—Testas šunims, kurie vemia, jaučia pilvos srities skausmus ir/ar yra anoreksiški

fPL (kačių kasos specifinė lipazė)—Testas katėms, su apatijos požymiais, sumažėjusiu apetitu, dehidracija, storio netekimu, vėminų ir/ar viduriavimu

FEKALIJOS

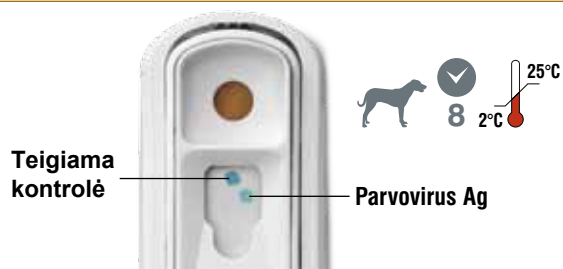

Parvo—Testas šunims, kuriems pasireiškia staigus mieguistumas, vėminas, karščiavimas, viduriavimas

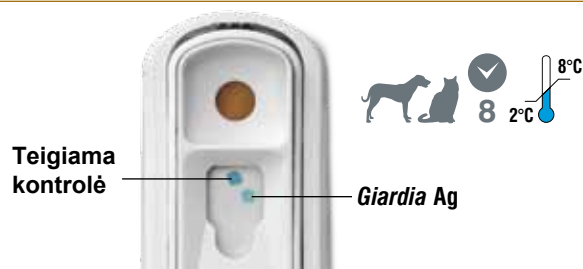

Giardia—Testas šunims ir katėms, kurie viduriuoja

IDEXX
LABORATORIES